

## SUTRICON Żel na blizny silikonowy 15g



cena: 29,91 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	-
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### **Wskazania:**

Codzienna pielęgnacja: blizn pooperacyjnych, blizn poparzeniowych, blizn pourazowych, blizn przerostowych i keloidów (bliznowców), blizn potrądzikowych, rozstępów.

#### **Działanie:**

Poprawia wygląd nowych i istniejących już blizn. Regularnie stosowany pomaga w pielęgnacji blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych. Wspomaga zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie blizn przy regularnym stosowaniu.

#### **Sposób użycia:**

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosować preparat minimum dwa razy dziennie. Najlepsze efekty pielęgnacji uzyskuje się poprzez aplikację żelu Sutricon połączoną z masażem blizny.

#### **Skład:**

Polisiloksany, dwutlenek krzemu.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.